

## **INFORMATION URGENTE DE SÉCURITÉ**

### **Cathéter Foley Mon-a-Therm™ avec capteurs de température**

Le 23 août 2018

Référence Medtronic : FA835

#### **À l'attention du : Correspondant de Matérovigilance**

Très cher client,

Cette lettre a pour objectif de vous informer que Degania Silicone procède au rappel volontaire des lots de production spécifiques de ses cathéters Foley Mon-a-Therm™ avec capteurs de température.

#### **Description du problème :**

Medtronic a reçu un avis de la part du fabricant de l'équipement d'origine, Degania Silicone, l'informant qu'il procédait au rappel des lots de production spécifiques des cathéters Foley Mon-a-Therm™ avec capteurs de température, et ce, à cause de capteurs de température défectueux qui affichent une température corporelle inférieure à la température réelle du patient (-2 C environ). La lettre ci-jointe, écrite par Degania Silicone, détaille ce rappel.

Medtronic vous demande d'arrêter immédiatement d'utiliser le produit concerné indiqué ci-dessous. Ce produit a été commercialisé entre juin 2017 et le 6 juillet 2018. Veuillez isoler et renvoyer tous les produits non utilisés des codes d'articles et des numéros de lots mentionnés dans l'Annexe A. Les produits non utilisés, dotés des codes d'articles et numéros de lots affectés doivent être renvoyés comme décrit dans la section Actions requises ci-après. Si vous avez distribué l'un des cathéters Foley Mon-a-Therm™ avec capteurs de température concernés répertoriés dans l'Annexe A, veuillez faire suivre les informations de cette lettre aux personnes concernées dans les plus brefs délais. Tous les produits inutilisés des codes d'articles et lots concernés doivent être renvoyés.

#### **Actions requises :**

1. Veuillez arrêter immédiatement l'utilisation des dispositifs associés aux codes d'articles et aux lots concernés répertoriés dans l'Annexe A et les mettre de côté.
2. Veuillez renvoyer les produits concernés selon la procédure ci-après.
3. Remplissez le formulaire de retour de produits rappelés même si vous n'avez pas de stock.

	Client disposant de produits concernés en stock	Client ne disposant d'aucun produit concerné en stock	Où envoyer le formulaire rempli
Si le produit a été acheté <b>directement</b> auprès de Medtronic	Veillez remplir le formulaire de vérification des retours ci-joint dans son intégralité. À réception du formulaire, le Service clientèle de Medtronic vous contactera pour organiser le retour de vos produits. Vous recevrez un avoir pour tout dispositif non utilisé que vous renvoyez.	Remplissez le formulaire et cochez la case « aucun produit concerné en stock ».	Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique à la personne-ressource de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de vérification.
Si le produit a été acheté auprès d'un <b>distributeur</b>	Remplissez <b>tous</b> les champs du formulaire et contactez directement votre distributeur pour convenir du retour du produit.	Remplissez le formulaire et cochez la case « aucun produit concerné en stock ».	Envoyez le formulaire rempli par fax ou par courrier électronique à votre distributeur et à la personne-ressource de Medtronic dont les coordonnées figurent sur le formulaire de vérification.

L'autorité locale compétente dans votre pays a été informée de cette action. Veuillez conserver une copie de cet avis dans votre documentation.

Si vous prenez connaissance d'un quelconque incident lié à ce problème, veuillez contacter votre représentant Medtronic pour lui fournir les informations relatives à ces événements de façon à observer les obligations réglementaires en matière de signalement.

Veillez nous excuser pour tout désagrément. Pour toute question ou en cas de problème, n'hésitez pas à contacter votre représentant Medtronic.

Cordialement,



Alexia Pedrini  
Directrice du Groupe MITG Surgical Innovations  
Medtronic

Page 2 sur 5

# Medtronic

## Medtronic France SAS

27 quai Alphonse Le Gallo – CS 30001  
92513 Boulogne-Billancourt cedex  
tél. : 01 55 38 17 00  
Fax : 01 55 38 18 00  
[www.medtronic.fr](http://www.medtronic.fr)

Pièce jointe : Avis urgent de sécurité de Degania Silicone

## Annexe A

Code d'article	Description	Numéros de lot concernés				
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17001607	S17002682	S17004509	S17005529	S17006719
		S17002091	S17003219	S17004510	S17005979	S17006720
		S17002440	S17003301	S17004511	S17005980	S17006721
		S17002441	S17003302	S17004771	S17005981	S17006722
		S17002558	S17003391	S17004772	S17005982	S17006723
		S17002559	S17003456	S17004902	S17005983	S17006724
		S17002560	S17004376	S17005028	S17005984	S17006725
		S17002561	S17004377	S17005029	S17005985	S17007360
		S17002562	S17004378	S17005030	S17005986	S17007459
		S17002563	S17004379	S17005117	S17006718	S17007622
		S17002681	S17004380	S17005281		
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000279	S17002452	S17003578	S17007065	S17003461
		S17000280	S17002892	S17005046	S17007171	S17006731
		S17000837	S17003306	S17005298		
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17002877	S17002878	S17003909	S17004477	S17005607
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000660	S17000946	S17002077	S17003350	S17004479
		S17000808	S17001347	S17002197	S17003351	S17004736
		S17000809	S17001348	S17002979	S17003439	S17005948
		S17000943	S17001349	S17003347	S17004190	S17005949
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000191	S17002884	S17004486	S17006333	S17007030
		S17000192	S17002982	S17004746	S17006334	S17007032
		S17000231	S17002983	S17004877	S17006687	S17007334
		S17000320	S17003784	S17005004	S17006688	S17007433
		S17001226	S17003785	S17005956	S17006689	S17007434
		S17002082	S17003916	S17005957	S17006690	S17007588
		S17002550	S17003917	S17005958	S17006926	S17000373
		S17002784	S17004351	S17006206	S17007029	S17008259
		S17002883				

## Annexe B

**COVIDIEN™**  
**Mon-a-Therm™**  
**Foley Catheter with Temperature Sensor 400TM**

Sonde de Foley avec capteur de température 400TM  
Foley-Katheter mit Temperatursensor 400TM  
Cathetere Foley con sensore della temperatura 400TM  
Sonda Foley con sensor de temperatura 400TM  
Foleykatheter med temperatursensor 400TM  
Foley-katheter med temperatursensor  
Catheter Foley con sensor de temperatura 400TM  
Balkonkatheter med temperaturfeiler 400TM

Foley'n katetiri sıcaklık sensörüne 400TM  
Καθετήρας Foley με αισθητήρα θερμοκρασίας 400TM  
Foleykatheter med temperaturfeiler 400TM  
Foleyho kateter s ležobním číselm 400TM  
Foley hőérzékelős katéter 400TM  
Катетеры Фолея серии с датчиком температуры 400TM  
Cevnik Foleyja z senzorjem temperature 400TM  
Isi Seroşkü Foley Catheter 400TM

REF **90056T**  
SIZE: 5-10ml Ch14  
Use by 2022 - 12  
LOT **S17008457**  
2018 - 01  
12

EN 12470-4  
Single use  
Latex, natural  
rubber-free  
**STERILE EO**  
ISO 15848  
ISO 15848  
ISO 15848  
ISO 15848  
ISO 15848  
ISO 15848  
0473

Mon-a-Therm™ is a Trademark of Covidien Inc.  
© 2011 Covidien - Made in India  
**Degania Silicone Ltd.**, Degania Bet 15130, Israel  
HR-Dugga-687 B (H)

(01)1088452200062  
(17)221280 (10)S17008457

863800211V Rev 0

**Code d'article**

**Numéro de lot**



Degania Silicone Ltd., 15130, Israël  
Tél. : +972-4-6755100 Fax : +972-4-6709182  
E-mail : [ds@ds-il.com](mailto:ds@ds-il.com) Site Web : [www.degania-medical.com](http://www.degania-medical.com)

## AVIS URGENT DE SÉCURITÉ

**Urgent : veuillez apporter la présente lettre à l'attention immédiate de la/des personne(s) responsable(s) de l'utilisation du produit mentionné ci-dessous :**

À l'attention du client :

21 juin 2018

Mise à jour : 26 juin 2018

Covidien AG  
Weg naar Zwartberg 239, hall 5  
Opglabbeek 3660  
Belgique

Cher client,

Cette lettre a pour objectif de vous informer que Degania Silicone procède au rappel volontaire des **cathéters à capteur de température** vendus à votre établissement. Veuillez consulter le tableau n° 1 pour obtenir les renseignements concernant les lots rappelés.

### **Description du problème :**

Les lots mentionnés ci-dessus pourraient comporter des cathéters avec des capteurs de température défectueux. Ces pièces afficheront une température corporelle inférieure à la température réelle du patient (-2 °C environ). Une mesure de la température corporelle du patient incorrecte peut avoir pour conséquence l'établissement d'un mauvais diagnostic et la prescription d'un traitement inefficace.

**Veillez suivre immédiatement les Actions requises par le client énoncées ci-dessous.**

1. Veuillez porter ces informations à l'attention immédiate des personnes responsables de l'utilisation des pièces concernées. Un rappel doit être effectué par votre entreprise afin de collecter tous les produits distribués mentionnés sur la liste des produits pouvant être concernés.
2. Veuillez remplir le formulaire Réponse au rappel et indiquer la quantité de produit concernés sont à votre disposition.
3. Retournez immédiatement le formulaire Réponse au rappel à Degania Silicone par e-mail : **[Katia@ds-il.com](mailto:Katia@ds-il.com)**



Degania Silicone Ltd., 15130, Israël  
Tél. : +972-4-6755100 Fax : +972-4-6709182  
E-mail : [ds@ds-il.com](mailto:ds@ds-il.com) Site Web : [www.degania-medical.com](http://www.degania-medical.com)

Tous les produits concernés doivent être renvoyés directement à notre entrepôt en Allemagne :

**Dietrich Gass oHG**  
Hauptstrasse 60a  
42349 Wuppertal-Cronenberg  
Allemagne  
Téléphone : +49 0202 247 68 15  
Contact : **Melissa Wagner** ([mw@degania-silicone.de](mailto:mw@degania-silicone.de))

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter Degania Silicone :

**Degania Silicone Ltd.**  
Degania Bet, 1513000,  
Israël  
Katia Kayam, Agent des réclamations client  
Tél. : +972-529532059  
E-mail : [Katia@ds-il.com](mailto:Katia@ds-il.com)

*Nous regrettons sincèrement la gêne occasionnée. Nous prenons les mesures nécessaires pour assurer la satisfaction de nos clients et patients, et vous remercions de votre compréhension.*

Cordialement, Degania Silicone LTD.

Andrew Holman, Directeur général

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrew Holman".



Degania Silicone Ltd., 15130, Israël  
 Tél. : +972-4-6755100 Fax : +972-4-6709182  
 E-mail : [ds@ds-il.com](mailto:ds@ds-il.com) Site Web : [www.degania-medical.com](http://www.degania-medical.com)

**Tableau 1 :**

Pièce/ matériel Medtronic n° :	Description du matériel/de la pièce :	Numéro de lot/série	Date de fabrication	Quantité distribuée, pièces
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000191	10-02-17	1800
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000192	13-02-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000231	14-02-17	2160
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000279	11-02-17	1800
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000280	15-02-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000320	18-02-17	2520
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000660	11-04-17	2520
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000808	11-04-17	2520
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000809	21-03-17	1800
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17000837	22-03-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000943	20-04-17	2160
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17000946	20-04-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17001226	12-04-17	3600
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17001347	20-04-17	1800
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17001348	08-04-17	1440
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17001349	29-04-17	3240
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17001607	19-04-17	1800
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17002077	29-04-17	3600
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002082	26-04-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002091	29-04-17	2160
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17002197	31-05-17	2880
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002440	09-05-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002441	12-05-17	3240
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17002452	05-05-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002550	22-05-17	3240
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002558	12-05-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002559	08-05-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002560	11-05-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002561	20-05-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002562	20-05-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002563	20-05-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002681	26-05-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17002682	06-06-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002784	09-06-17	3600



# Degania Silicone

Degania Silicone Ltd., 15130, Israël

Tél. : +972-4-6755100 Fax : +972-4-6709182

E-mail : [ds@ds-il.com](mailto:ds@ds-il.com) Site Web : [www.degania-medical.com](http://www.degania-medical.com)

90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17002877	27-05-17	720
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17002878	31-05-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002883	26-05-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002884	02-06-17	3240
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17002892	24-05-17	360
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17002979	09-06-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002982	02-06-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17002983	01-07-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003219	09-06-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003301	13-06-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003302	14-06-17	360
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17003306	12-06-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003347	13-06-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003350	13-06-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003351	30-06-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003391	20-06-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17003439	01-07-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17003456	20-06-17	360
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17003578	08-07-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003784	12-07-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003785	12-07-17	2160
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17003909	08-07-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003916	12-07-17	3600
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17003917	22-07-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17004190	20-07-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004351	24-07-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004376	21-07-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004377	21-07-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004378	22-07-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004379	22-07-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004380	24-07-17	720
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17004477	27-07-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17004479	29-07-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004486	26-07-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004509	29-07-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004510	29-07-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004511	29-07-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17004736	02-08-17	1440



Degania Silicone Ltd., 15130, Israël

Tél. : +972-4-6755100 Fax : +972-4-6709182

E-mail : [ds@ds-il.com](mailto:ds@ds-il.com) Site Web : [www.degania-medical.com](http://www.degania-medical.com)

90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004746	29-07-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004771	29-07-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004772	27-07-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17004877	05-08-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17004902	02-08-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005004	01-08-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005028	04-08-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005029	09-08-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005030	12-08-17	1800
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17005046	12-08-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005117	02-08-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005281	14-08-17	2880
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17005298	11-08-17	1800
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005529	23-08-17	2880
90053T	TSC CATHETER CLEAR 8FR STERILE	S17005607	18-08-17	720
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17005948	23-08-17	1080
90055T	TSC CATHETER CLEAR 12FR STERILE	S17005949	05-09-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005956	26-08-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005957	06-09-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17005958	06-09-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005979	19-08-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005980	26-08-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005981	28-08-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005982	30-08-17	2880
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005983	01-09-17	3600
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005984	31-08-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005985	01-09-17	360
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17005986	04-09-17	2160
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006206	08-09-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006333	16-09-17	3600
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006334	08-09-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006687	22-09-17	2880
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006688	23-09-17	1800
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006689	25-09-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006690	29-09-17	3240
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006718	23-09-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006719	23-09-17	2160
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006720	25-09-17	1440

# Degania Silicone

Degania Silicone Ltd., 15130, Israël

Tél. : +972-4-6755100 Fax : +972-4-6709182

E-mail : [ds@ds-il.com](mailto:ds@ds-il.com) Site Web : [www.degania-medical.com](http://www.degania-medical.com)

90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006721	28-09-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006722	03-10-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006723	26-09-17	720
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006724	06-10-17	1440
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17006725	11-10-17	1800
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17006926	11-10-17	3240
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007029	11-10-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007030	12-10-17	2520
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007032	23-10-17	3960
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17007065	12-10-17	360
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17007171	17-10-17	720
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007334	26-10-17	2880
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17007360	17-10-17	360
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007433	26-10-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007434	31-10-17	1080
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17007459	31-10-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17007588	04-11-17	2520
90051T	TSC CATHETER CLEAR 16FR STERILE	S17007622	31-10-17	1440
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17000373	03-03-17	1080
90056T	TSC CATHETER CLEAR 14FR STERILE	S17008259	12-12-17	1080
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17003461	20-06-17	1080
90052T	TSC CATHETER CLEAR 18FR STERILE	S17006731	21-09-17	720
<b>Total :</b>				<b>227 520</b>